

## <ご利用規約及びマシン使用同意書>

### 1. 個人情報について

当店でのサービスご利用の際にご提供いただく個人情報については、ご利用者の確認・照会のみにご利用いたします。法律に基づき開示が義務付けられている等の特別の事情がない限り、ご本人の事前の許可なしに第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

### 2. マシン使用の注意事項

#### <セルフホワイトニング>

##### ●禁止事項

- ①以下に当てはまる方は使用をお控えください。  
顎関節症の方／アレルギー体質(金属・食物・ラテックス)の方／光過敏症の方
- ②以下のいずれかに当てはまる方は、必ず医師とのご相談の上、ご使用ください。

・病院または歯科医院で治療を受けている方

・歯や体内に異常を感じて、医師の診療を必要とされている方

・妊娠中もしくは妊娠の可能性がある方

##### ●使用中の注意事項

- ・痛みや異常を感じた時は直ちに使用を注視ください。中止いただけない場合にはご返金には応じかねますので、ご了承をお願いいたします。
- ・効果にはお客様の歯の状態により個人差がございます。
- ・差し歯、入れ歯、詰め物、被せ物における材質の経年劣化による変色には効果がありません。
- ・神経を抜き歯が変色している場合・遺伝、先天性により歯に色素沈着がある場合、歯の形成期にテトラサイクリン系抗生物質を利用した副作用により永久歯に色素沈着がある場合には、白さが実感しにくくなります。
- ・歯の構造により汚れの落ち方に差異が生じ、白点や白線状の色が歯に見えることが極稀に発生いたします。

#### <セルフエステ>

##### ●禁止事項

- ①以下に当てはまる方は使用をお控えください。

医療用電子機器(ペースメーカー、人工心臓、心電計等)をお使いの方 / 心臓疾患(心臓病等) / 血液異常(血液凝固障害や血友病疾患等) / 悪性腫瘍 / 糖尿病 / 甲状腺疾患 / 肝機能障害 / 医療特定疾患(膠原病等) / 出血や内出血の可能性のある方

- ②以下に当てはまる方は必ず医師とのご相談の上でご使用ください。

原爆症 / 急性疾患 / 結核性疾患 / アレルギー疾患 / 法定伝染病 / 顔面黒皮症 / 38度以上の有熱性疾患 / 喘息や気管支疾患 / 特に肌が敏感の方(ケロイド体質、アトピー性皮膚等)や皮膚疾患(ヘルペス等) / 局所性、全身ステロイド系、非ステロイド系抗炎症薬やス

テロイド系ホルモン剤の使用／肝機能障害／血圧異常／薬物やホルモン治療／過去の疾病／アルコール中毒／体調が優れない方(激しい疲労感)／通院中や服薬がある方／妊娠中または妊娠の可能性のある方

③以下の部位へ使用しないでください。

粘膜、口内、眼球／心臓の近く／整形手術をした部位／ヒザ・ヒジなどの関節部位／傷口や脱毛・日焼け直後の部位／痛覚・知覚障害を起こしている部位／金属・プラスチック・シリコンなどを体内に埋め込んでいる部位周辺

④以下の皮膚トラブルをお持ちの方はその部位へ使用しないでください。

ニキビや吹き出物で炎症を起こしている部位／化粧品などで皮膚炎症を起こしている部位／アトピー・湿疹などの症状がある部位／痒みや火照り、物理的刺激による病的なシミのある部位

#### ●使用上の注意事項

・マシンは各部屋にあるマニュアルや注意事項を必ずご覧いただき、各トリートメントの時間や出力には十分注意し、使用方法に従ってご使用ください。

・1 部位 30 分以上はマシンを当てないでください。

・お客様の持病、体調等を原因とする事故については一切責任をお取りできません。

・必ず指定しておりますクリーム、ローション、ジェルをご使用ください。使用中に乾いてしまった場合には必ず足してください。クリームなどが足りない場合は火傷をする可能性があります。

・各ヘッドは肌に全面を密着させ、一箇所止めないように動かしてください。

・各ヘッド使用後は速やかに電源をお切りください。

・使用する前に指定しておりますクリーム、ローション、ジェルを必ず手のひらに塗り、プローブヘッドをあてて温度を確かめてください。

・異常な熱さなどの機器異常を感じた場合には使用を止め、スタッフにお声がけください。

・空腹時は避けて下さい。(目安:食後 1 時間以上)

・体調が優れない場合は無理に使用しないでください。

・時計や貴金属類はすべて外してください。

・雷が鳴った場合は直ちに使用を中止してください。

・揮発性の高いもの(除光液等)は近くで使用しないでください。

・各マシンヘッドは同時に使用しないでください。

●その他の注意事項

・マシンを使用された日は極端な高温での入浴・サウナ・岩盤浴等身体に負担がかかりすぎる行為は避けてください。

・マシンの同じ部位への使用は中 1 日空けてください。

今後当店が導入するマシンを含む全てのサービスにおいて、以上の注意を守らずにマシンを使用し、ご利用中に生じた人的、物的事故、及び盗難紛失については、弊社に故意または重大な過失がある場合・本サービス製品に欠陥がある場合等を除き、責任を負いません。また、注意事項を守らない利用や故意的な利用の仕方でもシンの故障があった場合、損害賠償をご請求する可能性がございます。

年 月 日

上記の各事項について説明を受けたことを確認し、本人の責任において利用規約・注意事項を遵守した上で該当施設の利用を行うことに同意いたします。万全を期して利用するとともに、万一事故が発生した場合にも自己責任において処理いたします。

(本人) 氏名:

(未成年の場合: 上記親権者)

住所: 氏名:

印(続柄)

必ず親権者ご本人が署名捺印してください。